

O Stonsil™


Stonsil™ to innowacyjny produkt do usuwania kamieni migdałowych w prosty i bezpieczny dla zdrowia sposób. Znajdująca się w opakowaniu produktu **Stonsil™** pipeta oraz gumka pozwalają już za pierwszym użyciem skutecznie pozbyć się kamieni migdałkowych i przynieść natychmiastową ulgę w odczuwanych objawach. Pipeta została stworzona specjalnie do użytku domowego, a jej regularnie stosowanie pozwala dbać o zdrowie jamy ustnej oraz górnych dróg oddechowych. Skuteczność **Stonsil™** została potwierdzona przez otolaryngologów z całego świata, którzy rekomendują codziennie korzystanie z produktu. Dla zachowania najwyższej higieny oraz skuteczności zaleca się wymianę **Stonsil™** raz na 6 miesięcy.

Zalety produktu

Stonsil™ to jedyny produkt na rynku, który pozwala łatwo i bezpiecznie usunąć nawet 100% kamieni migdałkowych. Polecany jest przez ekspertów z całej branży do codziennego oraz domowego oczyszczania migdałków oraz jamy ustnej. Znajdująca się w opakowaniu **Stonsil™** pipeta wykonana została z najwyższej jakości szkła wysoko borokrzemowego, które ze względu na bezpieczeństwo dla zdrowia jest szeroko wykorzystywane w medycynie. Dołączona do zestawu gumka pozwala na łatwą regulację siły zasysania kamieni znajdujących się w kryptach migdałków podniebiennych. Produkt **Stonsil™** pozwala na łatwy montaż oraz demontaż jego części, a tym samym ich dokładne oczyszczanie po każdym użyciu. Regularne korzystanie z pipety **Stonsil™** stymuluje pracę układu limfatycznego, eliminuje typowe objawy wywołane przez kamienie migdałkowe oraz zapobiega ich ponownemu tworzeniu się. Produkt jest wygodny w użyciu, a jego kompaktowa oraz dwuczęściowa budowa pozwala na łatwy transport.

STONSIL™

STONSIL.COM

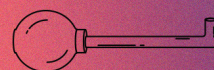


Sposób użycia

Przed każdorazowym użyciem **Stonsil™** należy upewnić się, że zawarta w zestawie pipeta oraz gumka nie posiadają widocznych uszkodzeń, a następnie dokonać ich dezynfekcji lub dokładnego oczyszczenia. Po wykonaniu tych czynności należy zamontować gumkę na końcu przystosowanej do tego dłuższej części pipety. Prawidłowo umieszczona gumka powinna w pełni przylegać do szkła oraz zakrywać obie widoczne wypustki oraz trzy znajdujące się na szyjce zagłębienia. Przygotowany do użycia produkt **Stonsil™** należy umieścić w otwartej jamie ustnej kierując przeciwną końcówkę pipety w stronę migdałków podniebiennych. Znajdują się one w tylnej części jamy ustnej tuż za widocznym łukiem podniebiennym. Przykładając drugi otwór pipety do migdałków należy nacisnąć gumkę tak, aby wytworzone podciśnienie zassało kamienie znajdujące się na zewnątrz oraz wewnątrz krypt migdałkowych. Zalecane jest, aby w trakcie pierwszego użycia produktu **Stonsil™** wszystkie działania wykonywać powoli oraz ostrożnie. Czynność tę należy powtarzać, aż do uzyskania zadowalających efektów oraz ustąpienia objawów dla obu stron jamy ustnej. W przypadku zassania jednocześnie dużej ilości kamieni migdałkowych należy dokonać ponownego oczyszczenia pipety oraz gumki przed kontynuacją oczyszczania. W trakcie i bezpośrednio po skorzystaniu z produktu **Stonsil™** może wystąpić nadmierna produkcja śliny, a także uczucie dyskomfortu w miejscu usuwania kamieni migdałkowych. Objawy te są całkowicie naturalne dla organizmu i powinny ustąpić krótko po zakończeniu procesu oczyszczania migdałków oraz ich krypt. W przypadku wystąpienia podrażnienia migdałków podniebiennych odczuwanych najczęściej jako lekki ból należy przerwać stosowanie produktu **Stonsil™** do czasu ustąpienia objawów. Zalecane jest, aby dokonać wymiany pipety oraz gumki w przypadku ich uszkodzenia lub zużycia, ale nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Po każdym użyciu **Stonsil™** należy zdemontować, a następnie zdezynfekować lub dokładnie oczyścić oraz osuszyć cały produkt.

STONSIL™

STONSIL.COM

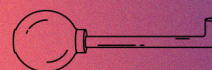

Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu **Stonsil™** w przypadku wystąpienia podrażnienia jamy ustnej. Odradza się korzystania z niego w przypadku stosowania leków lub istnienia przewlekłych chorób, szczególnie tych związanych z górnymi drogami oddechowymi. Kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także osoby po przebytej operacji przed skorzystaniem z produktu **Stonsil™** powinny zasięgnąć konsultacji z lekarzem lub specjalistą. Produkt może być stosowany od pierwszego użycia wyłącznie przez jedną osobę. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego dla osób dorosłych oraz zdrowych.

Przechowywanie

Stonsil™ jest odporny na czynniki środowiskowe, jednak przechowywanie go w suchym i chłodnym miejscu z dala od światła może wydłużyć jego żywotność. Należy zapobiegać jego uszkodzeniom mechanicznym oraz po skorzystaniu umieszczać **Stonsil™** w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenie

W przypadku doświadczenia reakcji alergicznej lub jakichkolwiek niepożądanych efektów należy zaprzestać używania produktu i niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej. W razie wątpliwości lub problemów zdrowotnych przez pierwszym użyciem pipety **Stonsil™** skorzystaj z porady lekarza, bądź innego specjalisty.

STONSIL™

STONSIL.COM

